

FLYDENDE RENGØRING- OG DESINFEKTIONSMIDDEL

Sekumatic® FDR

Baseret på Glucoprotamin®, aldehydefrit rengørings- og desinfektionsmiddel

Giver en sikker og effektiv desinfektion af termolabilt medicinsk udstyr, senge, sengeborde og transportudstyr. Sekumatic FDR er det ideelle middel til brug i automatiske processer.

Med et bredspektret effektivitetsniveau sikrer Sekumatic FDR:

- ▲ Høj materialeforenelighed
- ▲ Rengøring og desinfektion i 1 trin
- ▲ Brugervenligt i automatiske processer



Sekumatic® FDR

Baseret på Glucoprotamin®, aldehydefrit rengørings- og desinfektionsmiddel

Hvorfor anvende Sekumatic® FDR?

Mulighed for rengøring og desinfektion i et enkelt trin. Sekumatic FDR kan bruges i senge- og containervaskere til rengøring og desinfektion af senge, sengeborde, transportvogne og andet transportudstyr.

Sekumatic FDR kan også bruges i vaskedekontaminatorer til vask og desinfektion af termolabilt udstyr, som anæstesiudstyr, gummi, polyethylen eller polyvinylchlorid.

FLERE ANVENDELSESMULIGHEDER

Sekumatic FDR kan bruges til tøjvask og vaskedekontaminatorer til rengøring og desinfektion af respiratormasker og tilbehør.

Giver en perfekt opløsning og rengøringsevne. Ideel til desinfektionsfasen i en kemisk/termisk vaskeproces.



Glucoprotamin®



Sekumatic FDR
5L dunk



Sekumatic FDR
20L dunk

Uden aldehyder og meget få tensider giver den pH-neutrale formulering en særdeles høj materialeforenelighed.

GARANTERET EFFEKTIVITET

Selv ved lave temperaturer (60°C) sikrer Sekumatic FDR dokumenteret effektivitet mod et bredt spektrum af patogener.

MICROBIOLOGISKE TESTRESULTATER

| EFFEKTIVITET KONCENTRERET | KONCENTRATION | KONTAKTTID | TEMP |
|--|---------------|------------|------|
| Bactericid EN 13727 (rene og urene forhold) | 0.15% | 30 secs | 55°C |
| Gærdræbende EN 13624 - (rene forhold) | 0.5% | 60 secs | 55°C |
| Gærdræbende EN 13624 - (urene forhold) | 0.5% | 150 secs | 55°C |
| Tuberculocid EN 14348 (rene og urene forhold) | 1.0% | 300 secs | 60°C |
| Virucid ifølge RKI 1/2004 | 1.0% | 300 secs | 60°C |

EFFECTIVE.
PROVEN.
EFFICIENT.

ANVENDELSESOMRÅDER

Bruges til rengøring og desinfektion af materialer, som kræver kemisk desinfektion.

Specielt til brug i vaskedekontaminatorer, bækkenskyllere, sengevaskere, containere og tøjvaskemaskiner. Sekumatic FDR kan med fordel bruges til respiratormasker og relateret udstyr.

BRUGSINDIKATORER

Til automatisk rengøring og desinfektion med et kemisk/termisk vaskeprogram, 10ml/L ved 60° C i 5 minutter. NB følg altid materialeproducentens anvisninger.

Senge/containervaskere 5-10 ml/L ved 60° C i 90-120 sekunder.

Automatisk vask og desinfektion af respiratormasker og udstyr: 10 ml/L ved 60° C med 5 minutters kontakttid.

Vælg passende program på maskinen i forhold til producentens anvisninger, vær sikker på, at doseringen er indstillet korrekt.

INDEHOLDER

100 gram indeholder følgende aktive komponenter: 2,0 g Glucoprotamin, 2,0 g poly(oxy1,2-ethandiy), alpha-(2-(didecylmethylammonio)ethyl)-omegahydroxy-, (salt), 0,75 g benzalkoniumchloride

FORPAKNINGER OG ORDREINFORMATION

| PRODUKT | STØRRELSE | VARE-NUMMER |
|--------------------|-----------|-------------|
| Sekumatic FDR Dunk | 3 x 5L | 3078110 |
| Sekumatic FDR Dunk | 1 x 20L | 3078130 |
| Sekumatic FDR Fad | 1 x 200L | 3078100 |

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44 877 2000
www.ecolab.eu

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+49 (0) 2173 599 0

CE 0297

ECOLAB®